

Löffelreiniger

Produktinformation

Art der Anwendung

Konzentrat zur schonenden Entfernung von Zinkoxid-Eugenolpasten, Carboxylat- und Phosphatzementen, sowie Alginatresten von Metall und Kunststoffoberflächen. Das Konzentrat eignet sich ebenfalls zur Entfernung von thermoplastischen Abformmassen und Wachsen und kann auch im Ultraschallbad bei Raumtemperatur eingesetzt werden.

Hinweise zur Anwendung:

Der Tray Cleaner wird als 5-10%ige Lösung in Wasser angewendet. Die verunreinigten Teile werden am besten in die gebrauchsfertige Verdünnung eingelegt und diese je nach Verschmutzungsgrad mind. 45 Min. einwirken gelassen. Der Spezialreiniger ist für nichtrostende Gegenstände geeignet. Chrom-Nickel- und Aluminiumteile sollten nicht gemeinsam gereinigt werden. Korrosionsgefahr! Bei der Vorreinigung von invasiven Medizinprodukte müssen diese vor erneuter Verwendung gemäß Herstellerangabe hygienisch aufbereitet werden. Nur für professionelle Anwender!

Chemisch-physikalische Daten

- Dichte bei 20° C: 1,086 g/cm³
- pH- Wert bei 20° C: <11,5

Artikelnummer Lieferformen

- REF 97-705 5 Liter
- REF 97-815 1 Liter Dosierflasche, leer

Inhaltsstoffe

648/2004/EG: Zwischen 5% und 15% anionische Tenside, Duftstoffe.

Lieferant

UNIGLOVES®
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH
Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf

☎ +49 (0) 2241-9323-0
✉ unigloves@unigloves.de

Löffelreiniger

Produktinformation

Hinweise zu Vorkommnissen

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender/ vom Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/ Patient niedergelassen ist zu melden.

Sicherheitshinweise

H 318 Verursacht schwere Augenschäden. H 226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. P 210 Von Hitze Funken/ offener Flamme/ heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P 233 Behälter dicht verschlossen halten. P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P 337+P 313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.



Gefahr