

Unigloves Desinfektionstücher Plus Soft

Fresh (neutral) und Lemon Fresh

Zweckbestimmung als Medizinprodukt: Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten Geeignet für den medizinischen Bereich ((zahn)ärztliche Praxen, Kliniken, Altenheime, Pflege- und Rettungsdienste) und die Bereiche Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen.

Zusammensetzung:

- In 100g sind enthalten: 20,0g 1-Propanol; 5,0g 2-Propanol
- VO 648/2004/EG: Enthält Duftstoffe

Artikelnummer und Größe:

97-9190 Lemon Fresh
97-9290 Fresh (Neutral)
(90 Blatt/Nachfüllbeutel)



Sonstige Hinweise

- VO 648/2004/EG: Enthält Duftstoffe Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen.
- Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.
- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender/ vom Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/ Patient niedergelassen ist, zu melden.
- Alle Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen rein zu Informationszwecken. Für die hier gemachten Angaben wird keine Gewähr und/oder Garantie übernommen. Angaben über Eignung und Anwendung der Produkte stellen keine verbindliche Vereinbarung bezüglich der vertraglichen Beschaffenheit oder einer spezifischen Verwendungseignung des Produkts dar. Vertragliche Regelungen, insbesondere vereinbarte Produktspezifikationen, haben stets Vorrang. Wir behalten uns das Recht vor, die Angaben zu diesem Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.

Vorteile

- Hervorragende Materialverträglichkeit
- geeignet zur Desinfektion von empfindlichen Oberflächen elektronischer Geräte z.B. Bildschirme, Touch-Oberflächen von Tablets, Mobiltelefone, Acrylglas (PMMA)
- sehr breite und schnelle mikrobiologische Wirksamkeit bei stark reduziertem Alkoholanteil - flusenfreies Vlies
- optimales Abreißverhalten Durch geringen Alkoholanteil von nur 25% ist eine hervorragende Materialverträglichkeit auch bei alkoholempfindlichen Materialien wie Acrylglas (PMMA) oder Kunstleder gewährleistet
- nahezu rückstandsfrei
- parfümfrei (bei der Fresh (neutral) Variante)
- kurze Einwirkzeit
- VAH-zertifiziert
- IHO gelistet
- Phenolfrei
- schnelle Wirksamkeit
- ohne QAV
- aldehydfrei

Wirksamkeiten und Prüfmethode		Belastung	1 Min.	5 Min.
Bakterien und Candida albicans	EN 13727, EN 13624	hoch	3	
Tuberkulose-Erreger (M. terrae) und Mycobakterien (M. avium)	EN 14348	hoch	3	
„Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV)	EN 14476	hoch	3	
„Begrenzt viruzid Plus“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV und Noro-, Adeno- und Rota-Viren)	EN 14476	niedrig	3	
Polyoma SV 40	RKI/DVV	Mit Belastung	3	
Getränkte Tücher (100%PET)				
Bakterien und Candida albicans	EN 16615	hoch		3

Anwendungshinweise

Desinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten:

- Geeignet zur prophylaktischen Wischdesinfektion von Medizinprodukten wie z.B. dentalen Behandlungseinheiten, Krankenbetten, Blutdruckmessgeräte, Venenschläuche etc. Zur Desinfektion die Oberfläche des Medizinproduktes mit dem getränkten Tuch abwischen.
- Das Stick- & Liftetikett vom Beutel abziehen und auf den Entnahmebehälter kleben. Das Öffnungs- und Haltbarkeitsdatum im vorgesehenen Feld dokumentieren und beachten. Den Beutel oben öffnen und in den Entnahmebehälter setzen. Das erste Tuch der Vliesrolle anziehen und durch den Stern im Deckelverschluss fädeln. Die folgenden Tücher entnehmen. Den Deckel nach der Tuchentnahme fest auf den Behälter drücken und dicht verschließen. Nach vollständigem Verbrauch der Tücher ist der Entnahmebehälter gemäß den Aufbereitungshinweisen zu reinigen und zu desinfizieren. Die Aufbereitung soll mit einem geeigneten, vorzugsweise alkoholischen Desinfektionstuch erfolgen. Alle zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig mit der Desinfektionsslösung benetzt sein.
- Das Präparat gemäß angegebener Einwirkzeiten einwirken lassen. Gute Materialverträglichkeit gegenüber alkoholempfindlichen Materialien. Die Verwendung ist nur für professionelle Anwender vorgesehen. Die Tücher sind nach dem ersten Öffnen des Beutels maximal für 28 Tage verwendbar.



UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handels-gesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
Germany
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com

