

Unigloves Absauganlagen-Desinfektion

Konzentrat

Schaumarmes Konzentrat zur täglichen Reinigung und Desinfektion zahnärztlicher Absauganlagen und Mundspülbecken. Vorgesehen für den Einsatz im (zahn)medizinischen Bereich.

Zusammensetzung:

VO 648/2004/EG:

< 5% nichtionische Tenside,


< 5% kationische Tenside,

Duftstoffe

Artikelnummer und Größe:

97-4405 | 5 Liter

97-4410 | 10 Liter

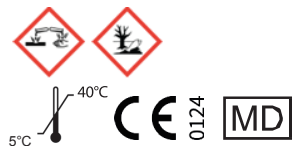

Vorteile

- wirkt auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen
- Extrem schaumarme Formulierung
- Materialschonend
- Schnelle Einwirkzeit
- Angenehmer Geruch
- Aldehyd- und phenolfrei
- VAH-zertifiziert

Anwendungshinweise


Das Konzentrat muss zuerst mit Wasser verdünnt werden. Dazu 20ml Konzentrat mit Leitungswasser auf 1000ml auffüllen und dieses durch den Saugschlauch (Speichelabsauger) durchsaugen. Die Absauganlage sollte je nach Belastung ein- bis zweimal täglich desinfiziert werden. Die Desinfektion des Mundspülbeckens erfolgt durch Eingießen von ca. 250ml der gebrauchsfertigen Verdünnung. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen! Gebrauchsfertige Lösungen immer frisch ansetzen und sofort verwenden! Nur für professionelle Anwender

Wirksamkeiten und Prüfmethode		Belastung	Konzentration in %	2 Min.	5 Min.	60 Min.
Bakterien und Candida albicans nach VAH mit hoher Belastung als Instrumentendesinfektion	VAH	hoch	2,0%		3	
			1,0%			3
Bakterien	EN 13727, EN 14561	hoch	3,0%	3		
Candida albicans	EN 13624, EN 14562	hoch	3,0%	3		
Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV)	RKI/DVV, EN 14476	mit Belastung	2,0%	3		
		hoch	2,0%		3	

Sonstige Hinweise

- Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen.
- Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.
- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender/vom Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/ Patient niedergelassen ist, zu melden.
- Alle Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen rein zu Informationszwecken. Für die hier gemachten Angaben wird keine Gewähr und/oder Garantie übernommen. Angaben über Eignung und Anwendung der Produkte stellen keine verbindliche Vereinbarung bezüglich der vertraglichen Beschaffenheit oder einer spezifischen Verwendungseignung des Produkts dar. Vertragliche Regelungen, insbesondere vereinbarte Produktspezifikationen, haben stets Vorrang. Wir behalten uns das Recht vor, die Angaben zu diesem Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.

pH-Wert: 9

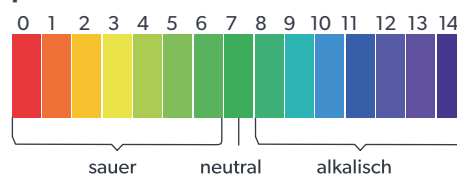

UNIGLOVES UK
 Registered in England No: 4010200
 VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
 Gillingham Business Park,
 Gillingham, ME8 0NJ, UK
 +44 (0)800 049 6602
 enquiries@unigloves.co.uk
 uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf,
 Germany
 +49 (0) 2241-9323-0
 unigloves@unigloves.de
 de.unigloves.com

