

Unigloves Flächendesinfektion alkoholfrei

Flächendesinfektion alkoholfrei

Als Medizinprodukt: Alkoholfreies, gebrauchsfertiges Präparat zur prophylaktischen Desinfektion von Oberflächen empfindlicher nicht invasiver Medizinprodukte. Das Produkt kombiniert eine sehr gute Wirksamkeit mit einer herausragenden Materialverträglichkeit. Als Biozidprodukt: Alkoholfreie gebrauchsfertige Wischdesinfektion zur Desinfektion und Reinigung von Flächen. Besonders geeignet zur Anwendung auf alkoholempfindlichen Flächen wie Acrylglas.

Zusammensetzung:

100 g enthalten:

- 0,24g Benzyl-C12-16-alkylidimethylammoniumchlorid;
- 0,24g N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchlorid
- 0,24g C12-14 Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammoniumchlorid

Artikelnummer und Größe:

97-6750 | 1 Liter

97-6005 | 5 Liter



Vorteile

- Hervorragende Materialverträglichkeit z.B. gegenüber Tablets, Acrylglas oder empfindlichem Kunstleder
- breite Wirksamkeit innerhalb kürzester Zeit
- VAH-zertifiziert
- Aldehydfrei
- Phenolfrei

Anwendungshinweise

Vorgesehen für den Einsatz im medizinischen Bereich ((zahn)ärztliche Praxen, Kliniken, Altenheime, Pflege- und Rettungsdienste) sowie im Bereich Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen.

Wirksamkeiten und Prüfmethode		Belastung	Konzentration in %	1 Min.	2 Min.	30 Min.
Desinfektion von kleinen Flächen in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen						
Bakterien und Candida albicans	EN 1276, EN 1650	hoch	unverdünnt	↻		
Prophylaktischen Desinfektion von nicht invasiven Medizinprodukten und Oberflächen im medizinischen Bereich						
Bakterien und Candida albicans	EN 13727, EN 13624	hoch	unverdünnt	↻		
Bakterien und Candida albicans	VAH mit Mechanik, EN 16615	hoch	unverdünnt		↻	
„Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV)	RKI/DVV, EN 14476	hoch	unverdünnt	↻		
Rota-Viren	EN 14476	niedrig	unverdünnt	↻		
Noro-Viren	EN 14476	niedrig	unverdünnt			↻
Polyoma-SV 40 Viren	RKI/DVV	mit Belastung	unverdünnt			↻


Sonstige Hinweise

- Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen.
- Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.
- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender/ vom Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/ Patient niedergelassen ist, zu melden.
- Alle Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen rein zu Informationszwecken. Für die hier gemachten Angaben wird keine Gewähr und/oder Garantie übernommen. Angaben über Eignung und Anwendung der Produkte stellen keine verbindliche Vereinbarung bezüglich der vertraglichen Beschaffenheit oder einer spezifischen Verwendungseignung des Produkts dar. Vertragliche Regelungen, insbesondere vereinbarte Produktspezifikationen, haben stets Vorrang. Wir behalten uns das Recht vor, die Angaben zu diesem Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.

Anwendungshinweise

- Desinfektion von Medizinprodukten: Präparat zur prophylaktischen Wischdesinfektion von Medizinprodukten wie z.B. dentalen Behandlungseinheiten, Krankenbetten, Blutdruckmessgeräten etc. Zur Wischdesinfektion ein nach EN 16615 geprüftes Tuch intensiv mit der Desinfektionslösung tränken und die Flächen abwischen. Alternativ die Lösung direkt auf die Fläche geben und anschließend mit dem betreffenden Tuch wischen.
- Desinfektion von Oberflächen: Zur Wischdesinfektion und Reinigung von kleinen Flächen ein geeignetes Tuch mit der Desinfektionslösung sehr gut benetzen und die Flächen abwischen, bzw. die Lösung direkt auf die Fläche geben und danach wischen.
- Alle zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig mit der Desinfektionslösung benetzt sein. Das Präparat gemäß angegebener Einwirkzeiten einwirken lassen. Auch zum Tränken von kompatiblen und mit der Wischdesinfektion geprüften Vliestuch-Rollen geeignet. Es ist in diesem Anwendungsfall die geforderte Tränkmenge des jeweiligen Vliesmaterials zu beachten. Zur Anwendung auf alkoholverträglichen Materialien (z.B. Acrylglas) geeignet. Die Materialverträglichkeit sollte bei neuen oder unbekannten Materialien an einer nicht sichtbaren Stelle zu prüfen sein. Um Schlierenbildung zu vermeiden, sollten die behandelten Flächen in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten (Wasser) Einmaltuch nachgewischt werden. Die Verwendung ist nur für professionelle Anwender vorgesehen.

pH-Wert: 7,2

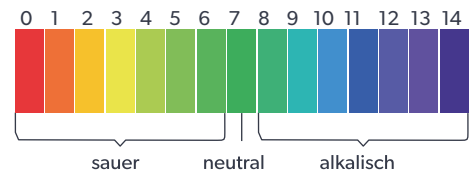

UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
Germany
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com

