

Unigloves Kältespray CLASSIC

Präparat zur Vitalitätsprüfung von Zähnen

Vitalitätsprüfung von Zähnen: Vereisen von Schaumstoffpellets zur Anwendung im Dentalbereich. Abkühlen von Abdruckmaterialien: Speziell geeignet für Materialien wie Hydrokolloid.

Artikelnummer und Größe | Verfügbare Duftnoten (200 ml Dose):

9500 | Classic
9700 | Orange
9800 | Mint



Vorteile

- Effektive Zahn-Vitalitätsprüfung: Schnelles Vereisen von Schaumstoffpellets für präzise Ergebnisse
- Ideal zum Abkühlen von Abdruckmaterialien wie Hydrokolloid
- Einfache Handhabung: Leichte Anwendung aus 2–3 cm Entfernung
- Schnelle Anwendung: Vereisung erfolgt in 1–2 Sekunden

Anwendungshinweise

Gebrauchsanweisung:

- Den zu kühlenden Gegenstand aus 2–3 cm Entfernung für 1–2 Sekunden einsprühen.
- Nicht direkt im Mund anwenden: Vereisungsgefahr.
- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Wichtige Hinweise:

- Nur für professionelle Anwender geeignet.
- Sicherheits- und Handhabungshinweise strikt beachten.

Sonstige Hinweise

- Vereisungsgefahr: Nicht direkt im Mund anwenden.
- Lagerung und Schutz: Vor Temperaturen über 50°C und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
- Sicherer Umgang: Behälter nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- Einsatzbereich: Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender/ vom Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/ Patient niedergelassen ist, zu melden.
- Alle Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen rein zu Informationszwecken. Für die hier gemachten Angaben wird keine Gewähr und/oder Garantie übernommen. Angaben über Eignung und Anwendung der Produkte stellen keine verbindliche Vereinbarung bezüglich der vertraglichen Beschaffenheit oder einer spezifischen Verwendungseignung des Produkts dar. Vertragliche Regelungen, insbesondere vereinbarte Produktspezifikationen, haben stets Vorrang. Wir behalten uns das Recht vor, die Angaben zu diesem Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.



UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

 3 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
 +44 (0)800 049 6602
 enquiries@unigloves.co.uk
 uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

 Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
Germany
 +49 (0) 2241-9323-0
 unigloves@unigloves.de
 de.unigloves.com

