

Unigloves Okklusions Spray

Mikropulverisiertes Markierungsspray, hellgrün

Okklusions Spray: Markierungsspray zur Sichtbarmachung von Kontaktpunkten und -flächen bei der Herstellung von Zahnersatz

Artikelnummer und Größe:
9601 | 75 ml Dose



Vorteile

- Präziser Sprühfilm: Gleichmäßige und klare Markierung selbst kleinster Kontaktpunkte
- Leichte Entfernung: Rückstandslos mit Wasser entfernbar
- Individuell anpassbar: Regulierbare Pigmentschichtdicke für jeden Bedarf
- Zuverlässig und bewährt: Keine Verstopfungen, einfache Handhabung, langjährig erprobt

Sonstige Hinweise

- Aufbewahrung: Nicht über 50°C lagern und vor Sonnenlicht schützen.
- Sicherheitsmaßnahmen: Druckbehälter nicht durchstechen oder verbrennen, auch nach Gebrauch nicht.
- Anwendung: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Meldung von Vorkommnissen: Schwerwiegende Vorfälle müssen an Hersteller und zuständige Behörden gemeldet werden.
- Professionelle Nutzung: Nur für geschulte Anwender im dentaltechnischen Bereich geeignet.
- Alle Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen rein zu Informationszwecken. Für die hier gemachten Angaben wird keine Gewähr und/oder Garantie übernommen. Angaben über Eignung und Anwendung der Produkte stellen keine verbindliche Vereinbarung bezüglich der vertraglichen Beschaffenheit oder einer spezifischen Verwendungseignung des Produkts dar. Vertragliche Regelungen, insbesondere vereinbarte Produktspezifikationen, haben stets Vorrang. Wir behalten uns das Recht vor, die Angaben zu diesem Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.

Anwendungshinweise

Gebrauchsanweisung:

- Dose vor Gebrauch gut schütteln.
- Aus einer Entfernung von 2-5 cm dünn auf die zu untersuchende Stelle aufsprühen.
- Der Pigmentschichtfilm kann leicht und rückstandsfrei mit Wasser entfernt werden.

Wichtige Hinweise:

- Nur für professionelle Anwender.
- Nicht direkt am Patienten anwenden.



UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
Germany
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com

