

Unigloves Flächendesinfektion PLUS

Schnelldesinfektion alkoholisch

Als Medizinprodukt: Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von (invasiven und) nicht invasiven Medizinprodukten. Als Biozidprodukt: Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur Desinfektion und Reinigung von kleineren Flächen. Geeignet für den medizinischen Bereich ((zahn)ärztliche Praxen, Kliniken, Altenheime, Pflege- und Rettungsdienste) und die Bereiche Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen.

Zusammensetzung:

- 100 g enthalten:
- 20,0 g 1-Propanol
 - 5,0 g 2-Propanol

Artikelnummer und Größe:

- 97-001 Lemon Fresh | 1 Liter
- 97-005 Lemon Fresh | 5 Liter
- 97-010 Lemon Fresh | 10 Liter
- 97-8001 Fresh | 1 Liter
- 97-8005 Fresh | 5 Liter
- 97-8010 Fresh | 10 Liter
- 97-5001 grüner Apfel | 1 Liter
- 97-5005 grüner Apfel | 5 Liter
- 97-1010 grüner Apfel | 10 Liter



Vorteile

- Hervorragende Materialverträglichkeit z.B. bei Tablets, Acrylglas oder empfindlichem Kunstleder
- Sehr breite und schnelle mikrobiologische Wirksamkeit bei stark reduziertem Alkoholanteil
- Aldehydfrei
- Phenolfrei
- Gute Materialverträglichkeit
- Nahezu rückstandsfrei
- Schnelle Wirksamkeit
- Geeignet als Tränkflüssigkeit für trockene Tücher
- IHO gelistet

Wirksamkeiten und Prüfmethode		Belastung	30 Sek.	1 Min.	5 Min.
Bakterizid	EN 13727, EN 13624, EN 16615, VAH	hoch		3	
Candida albicans	EN 13727, EN 13624, EN 16615, VAH	hoch		3	
TbB (Tuberkulose)-Erreger (M. terrae)	EN 14348	hoch		3	
Mykobakterien (M. avium)	EN 14348	hoch		3	
„Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV)	EN 14476	hoch		3	
„Begrenzt viruzid PLUS“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV und Noro-, Adeno- und Rota-Viren)	EN 14476	hoch		3	
Polyoma SV 40	RKI/DVV	mit Belastung		3	


Sonstige Hinweise

- Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen.
- Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.
- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender/ vom Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/ Patient niedergelassen ist, zu melden.
- Alle Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen rein zu Informationszwecken. Für die hier gemachten Angaben wird keine Gewähr und/oder Garantie übernommen. Angaben über Eignung und Anwendung der Produkte stellen keine verbindliche Vereinbarung bezüglich der vertraglichen Beschaffenheit oder einer spezifischen Verwendungseignung des Produkts dar. Vertragliche Regelungen, insbesondere vereinbarte Produktspezifikationen, haben stets Vorrang. Wir behalten uns das Recht vor, die Angaben zu diesem Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.

Anwendungshinweise

- Alle zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig mit der Desinfektionslösung benetzt sein. Das Präparat gemäß angegebener Einwirkzeiten einwirken lassen. Gute Materialverträglichkeit gegenüber alkoholempfindlichen Materialien. Auch zum Tränken von kompatiblen und mit der Wischdesinfektion geprüften Vlies-tuch-Rollen geeignet. Es ist in diesem Anwendungsfall die geforderte Tränkmenge des jeweiligen Vliesmaterials zu beachten. Die Verwendung ist nur für professionelle Anwender vorgesehen.
- Geeignet für den medizinischen Bereich ((zahn)ärztliche Praxen, Kliniken, Altenheime, Pflege- und Rettungsdienste) und die Bereiche Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen.

pH-Wert: < 10

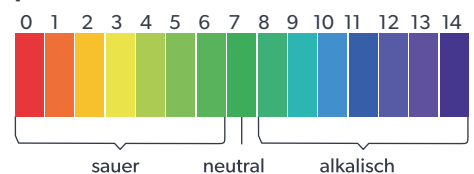


UNIGLOVES UK
 Registered in England No: 4010200
 VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
 Gillingham Business Park,
 Gillingham, ME8 0NJ, UK
 +44 (0)800 049 6602
 enquiries@unigloves.co.uk
 uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf,
 Germany
 +49 (0) 2241-9323-0
 unigloves@unigloves.de
 de.unigloves.com

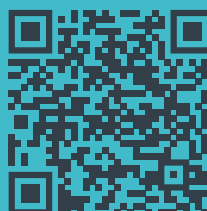

Issue No. 3.0
 23/06/2026