

Unigloves Abformdesinfektion PLUS

Abdruckdesinfektionsmittel

Gebrauchsfertige, aldehydfreie Abdruckdesinfektion für dentale Abformmaterialien.

Zusammensetzung:

100 g enthalten:

- 0,24g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchlorid
- 0,24g N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchlorid
- 0,24g C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammoniumchlorid
- 0,35g Chlorhexidingluconat

Artikelnummer und Größe:

97-905 | 5 Liter

97-910 | 10 Liter



Vorteile

- Angenehmer Geruch
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Aldehyd- und phenolfrei
- VAH-zertifiziert
- IHO-gelistet
- Nicht alkoholbasiert

Anwendungshinweise

Die betreffende Abformung zuerst mit Wasser abspülen, anschließend in die gebrauchsfertige Desinfektionslösung einlegen und nach der empfohlenen Einwirkzeit wieder entnehmen. Die Abformung muss vollständig mit der Lösung bedeckt sein. Alginat und Hydrokolloide nur kurz eintauchen und abtrocknen lassen. Die Abformung anschließend vorsichtig mit einem weichen Wasserstrahl abspülen. Die Lösung nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen. Die Gebrauchslösung ist bei sichtbarer Verschmutzung und gem. RKI-Empfehlung mindestens arbeitstäglich zu wechseln. Die Entsorgung kann über das Abwasser erfolgen. Nur für professionelle Anwender.

Wirksamkeiten und Prüfmethode		Belastung	5 Min.	10 Min.	15 Min.	30 Min.
Bakterien (inkl. MRSA)	EN 13727, EN 14561, VAH	hoch	☞			
Candida albicans	EN 14476, EN 17111	hoch	☞			
„begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV)	EN 13624, EN 14562, VAH	niedrig	☞			
TbB (M. terrae im Suspensionstest)	EN 14476, EN 17111	niedrig				☞

Sonstige Hinweise

- Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen.
- Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.
- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender/ vom Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/ Patient niedergelassen ist, zu melden.
- Alle Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen rein zu Informationszwecken. Für die hier gemachten Angaben wird keine Gewähr und/oder Garantie übernommen. Angaben über Eignung und Anwendung der Produkte stellen keine verbindliche Vereinbarung bezüglich der vertraglichen Beschaffenheit oder einer spezifischen Verwendungseignung des Produkts dar. Vertragliche Regelungen, insbesondere vereinbarte Produktspezifikationen, haben stets Vorrang. Wir behalten uns das Recht vor, die Angaben zu diesem Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.




UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
Germany
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com

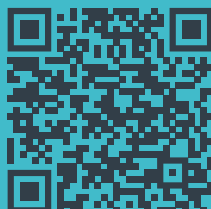

Issue No. 3.0
23/06/2026