

Unigloves Instrumentendesinfektion Forte Plus Konzentrat

Konzentrat zur manuellen Desinfektion von medizinischen und chirurgischen Instrumenten im Tauchbadverfahren Für die Verwendung im medizinischen Bereich als Instrumentendesinfektion z. B. in (zahn)ärztlichen Praxen, Kliniken, Altenheimen, Pflege- und Rettungsdiensten sowie Fußpflegestudios. Zur Verwendung in Ultraschallbädern geeignet.

Zusammensetzung:

100 g enthalten:

- 8,0g Didecylmethylammoniumchlorid
- 5,0g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin


VO 648/2004/EG: Enthält 5-15% nichtionische Tenside, 5-15% kationische Tenside, Duftstoffe.

Artikelnummer und Größe:

97-301 | 1 Liter Dosierflasche

97-305 | 5 Liter Dosierflasche

97-310 | 10 Liter Dosierflasche

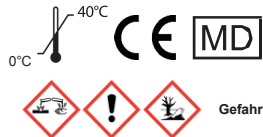

Vorteile

- Mit besonders breitem Wirkspektrum: Bakterizid, Mykobakterizid, Fungizid, Viruzid
- aldehydfrei
- phenolfrei
- Nicht-korrosiv
- Gute Materialverträglichkeit
- VAH-gelistet
- IHO gelistet

Anwendungshinweise


Das Konzentrat mit 10°C bis 30°C warmem Wasser (mindestens Trinkwasserqualität) verdünnen (Dosierflasche oder Dosieranlage verwenden). Gemäß der Empfehlung des RKI/BfArM ist auf eine gründliche Vorreinigung bzw. mechanische Reinigung sowie ggf. Zwischenspülung der Instrumente vor der Desinfektion zu achten. Anschließend die gereinigten Instrumente sofort in geöffnetem Zustand in die Gebrauchslösung einlegen. Sämtliche zu desinfizierenden Oberflächen und Hohlräume müssen von der Gebrauchslösung vollständig benetzt sein.

Wirksamkeiten und Prüfmethode	Belastung	Konzentration in %	5 Min.	10 Min.	15 Min.	30 Min.	60 Min.
terminale Desinfektion von semikritischen Medizinprodukten	-	3,0					☞
Bakterien und Candida albicans	EN 13727, EN14561, EN 13624, EN14562, VAH	hoch	2,0		☞		
			1,0				☞
TbB (M. terrae)	EN 14348, EN 14563	niedrig	2,0				☞
Mycobakterien	EN 14348, EN 14563	niedrig	3,0				☞
Pilze (A. brasiliensis)	EN 13624, EN 14562	niedrig	3,0				☞
„Viruzid“ (unbehüllte Viren wie z.B. Adeno-, Noro-, Polio-Viren)	EN 14476, EN 17111	niedrig	3,0				☞
			4,0			☞	
„begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HCV, HIV)	EN 14476, EN 17111	hoch	0,5		☞		
Polyoma SV 40	RKI/DVV	-	3,0		☞		
Noro-Viren	EN 14476, EN 17111	hoch	3,0		☞		
Adeno-Viren	EN 14476, EN 17111	niedrig	3,0				☞
			4,0			☞	

Anwendungshinweise

Je nach Verschmutzungsgrad ist die Gebrauchslösung zu erneuern (RKI-Empfehlung: Mindestens arbeitstäglich). Nach der Desinfektionszeit die Instrumente gründlich mit bevorzugt demineralisiertem Wasser abspülen und trocknen. Für kritische Instrumente wird laut RKI-Empfehlung eine abschließende Sterilisation empfohlen. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen. Die Aufbereitungshinweise der Instrumentenhersteller sowie die Aufbereitungshinweise der RKI/KRINKO Empfehlung sind zu beachten. Materialveränderungen bei Polycarbonat und Polyamid im Dauereinsatz sind nicht auszuschließen, können jedoch durch ausreichendes Spülen nach jeder Anwendung weitestgehend vermieden werden. Beim Einsatz neuer Materialien ist vorab die Verträglichkeit zu überprüfen. Die Gebrauchslösung kann über das Abwasser entsorgt werden. Um die Wirksamkeit zu gewährleisten, müssen Dosiermengen und Einwirkzeiten möglichst genau eingehalten und nicht unterschritten werden. Überdosierungen sollten aus Umweltschutzgründen und Materialverträglichkeiten ebenfalls vermieden werden. Nicht geeignet zur terminalen Desinfektion von kritischen Medizinprodukten! Nur für professionelle Anwender.

pH-Wert: > 11

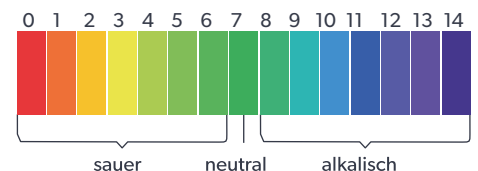

Sonstige Hinweise

- Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen.
- Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.
- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender/ vom Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/ Patient niedergelassen ist, zu melden.
- Alle Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen rein zu Informationszwecken. Für die hier gemachten Angaben wird keine Gewähr und/oder Garantie übernommen. Angaben über Eignung und Anwendung der Produkte stellen keine verbindliche Vereinbarung bezüglich der vertraglichen Beschaffenheit oder einer spezifischen Verwendungseignung des Produkts dar. Vertragliche Regelungen, insbesondere vereinbarte Produktspezifikationen, haben stets Vorrang. Wir behalten uns das Recht vor, die Angaben zu diesem Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.

UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
Germany
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com

