

Unigloves Flächendesinfektion AF Konzentrat

Konzentrat

Als Medizinprodukt: Flächendesinfektionsmittel zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten. Nicht geeignet zur abschließenden (terminalen) Desinfektion von invasiven Medizinprodukten. Als Biozidprodukt: Aldehydfreies Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen. Geeignet zur Wischdesinfektion von großen Flächen wie Böden und Wände. Ebenfalls geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten wie z.B. dentalen Behandlungseinheiten, OP-Schuhen, Gummischürzen, Krankbetten, Blutdruckmessgeräte, Venenschläuche, Nachttischen, Betten, Gehhilfen, Badewannen, Toilettensitzen etc.

Zusammensetzung:

In 100g sind enthalten:


- 10,8g Didecylmethylammoniumchlorid
- 6,0g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Kennzeichnung gemäß VO 648/2004/EG: Enthält < 5 % nichtionische Tenside, 5-15% kationische Tenside, Duftstoffe

Artikelnummer und Größe:

97-501 | 1 Liter Dosierflasche

97-505 | 5 Liter Dosierflasche

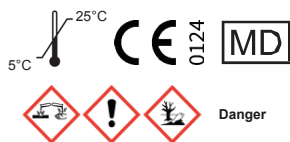

Sonstige Hinweise

- Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 01 entsorgen.
- Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.
- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender/ vom Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/ Patient niedergelassen ist, zu melden.
- Alle Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen rein zu Informationszwecken. Für die hier gemachten Angaben wird keine Gewähr und/oder Garantie übernommen. Angaben über Eignung und Anwendung der Produkte stellen keine verbindliche Vereinbarung bezüglich der vertraglichen Beschaffenheit oder einer spezifischen Verwendungseignung des Produkts dar. Vertragliche Regelungen, insbesondere vereinbarte Produktspezifikationen, haben stets Vorrang. Wir behalten uns das Recht vor, die Angaben zu diesem Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.

Vorteile

- VAH-gelistet
- Hervorragende Reinigungsleistung (zusätzl. Einsatz von Reinigungsadditiven nicht notwendig)
- Hinterlässt keine klebrigen Rückstände
- Extrem breites Wirkungsspektrum mit niedriger Anwendungskonzentration
- Auch für Dosieranlagen geeignet
- Ohne Aldehyde oder Phenole

Anwendungshinweise

Zur Desinfektion von Medizinprodukten und Oberflächen im medizinischen Bereich: Zur Wischdesinfektion ein nach EN 16615 geprüftes Tuch mit der Desinfektionslösung sehr gut benetzen und die Flächen abwischen, bzw. die Lösung direkt auf die Fläche geben und danach mit dem betreffenden Tuch wischen.


Wirksamkeiten und Prüfmethode	Belastung	Konzentration in %	5 Min.	15 Min.	30 Min.	60 Min.
Desinfektion von Medizinprodukten						
Bakterien und Candida albicans	EN 13727, EN 13624, EN 16615, VAH	hoch	0,5			
Tuberkulose-Erreger (M. terrae)	EN 14348	niedrig	2,0			
		hoch	0,5			
		hoch	1,0			
„Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren)	EN 14476, RKI/DVV	hoch	1,0			
		hoch	0,5			
„Begrenzt viruzid PLUS“	EN 14476	niedrig	2,0			
Rota-Viren	EN 14476	niedrig	0,5			
		niedrig	2,0			
Adeno-Viren	EN 14476	niedrig	1,0			
Polyoma SV 40-Viren	EN 14476	hoch	1,5			
Noro-Viren	EN 14476	hoch	1,0			

Anwendungshinweise

Zur Desinfektion von Oberflächen: Zur Wischdesinfektion ein geeignetes Tuch oder einen Mopp mit der Desinfektionslösung sehr gut benetzen und die Flächen abwischen, bzw. die Lösung direkt auf die Fläche geben und danach wischen. Desinfizierte Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, müssen mit Trinkwasser abgespült werden.

Das Desinfektionsmittelkonzentrat wird vor seiner Anwendung zuerst mit Leitungswasser verdünnt. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen! Vor großflächigen Anwendungen auf empfindlichen Materialien wie Kunstleder erst an einer kleinen verdeckten Stelle auf Materialverträglichkeit testen. Alle zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig feucht und benetzt sein. Um Schlierenbildung zu vermeiden, sollten die behandelten Flächen in regelmäßigen Abständen feucht (Wasser) nachgewischt werden. Nur als Wischdesinfektion anzuwenden! Nur für professionelle Anwender. Unbenutzte, gebrauchsfertige Lösung muss je nach Verschmutzungsgrad, mindestens jedoch arbeitstäglich gewechselt werden. Die Entsorgung der Gebrauchslösung kann über die Kanalisation erfolgen. Geeignet für den medizinischen Bereich (Zahn) ärztliche Praxen, Kliniken, Altenheime, Pflege- und Rettungsdienste) und die Bereiche Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen.

pH-Wert: > 11

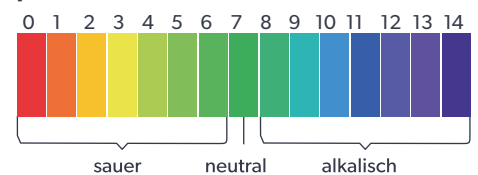

UNIGLOVES UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
Germany
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com

