

Unigloves Löffelreiniger Konzentrat

Konzentrat zur schonenden Entfernung von Zinkoxid-Eugenolpasten, Carboxylat- und Phosphatzementen, sowie Alginatresten von Metall- und Kunststoffoberflächen. Das Konzentrat eignet sich ebenfalls zur Entfernung von thermoplastischen Abformmassen und Wachsen und kann auch im Ultraschallbad bei Raumtemperatur eingesetzt werden.

Zusammensetzung:

648/2004/EG: Zwischen 5% und 15% anionische Tenside, Duftstoffe.

Artikelnummer und Größe:

97-705 | 5 Liter



Vorteile

- Löst schnell und wirksam Reste
- Konzentrat zur 5-10%igen Anwendung
- Inhaltsstoffe biologisch abbaubar
- geeignet für nichtrostende Gegenstände
- Lösung auch im Ultraschallbad einsetzbar

Anwendungshinweise


Der Tray Cleaner wird als 5-10%ige Lösung in Wasser angewendet. Die verunreinigten Teile werden am besten in die gebrauchsfertige Verdünnung eingelegt und diese je nach Verschmutzungsgrad mind. 45 Min. einwirken gelassen. Der Spezialreiniger ist für nichtrostende Gegenstände geeignet. Chrom-Nickel- und Aluminiumteile sollten nicht gemeinsam gereinigt werden. Korrosionsgefahr!

Bei der Vorreinigung von invasiven Medizinprodukten müssen diese vor erneuter Verwendung gemäß Herstellerangabe hygienisch aufbereitet werden. Nur für professionelle Anwender!

Sonstige Hinweise

- Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen.
- Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.
- Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender/ vom Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/ Patient niedergelassen ist, zu melden.
- Alle Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen rein zu Informationszwecken. Für die hier gemachten Angaben wird keine Gewähr und/oder Garantie übernommen. Angaben über Eignung und Anwendung der Produkte stellen keine verbindliche Vereinbarung bezüglich der vertraglichen Beschaffenheit oder einer spezifischen Verwendungseignung des Produkts dar. Vertragliche Regelungen, insbesondere vereinbarte Produktspezifikationen, haben stets Vorrang. Wir behalten uns das Recht vor, die Angaben zu diesem Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.

pH-Wert: 11.3

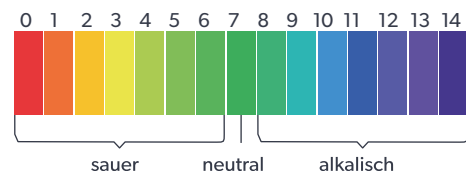

UNIGLOVES UK
 Registered in England No: 4010200
 VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
 Gillingham Business Park,
 Gillingham, ME8 0NJ, UK
 +44 (0)800 049 6602
 enquiries@unigloves.co.uk
 uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf,
 Germany
 +49 (0) 2241-9323-0
 unigloves@unigloves.de
 de.unigloves.com

