

Unigloves Desinfektionstücher alkoholfrei

alkoholfreie Desinfektion

Als Medizinprodukt: Alkoholfreie, gebrauchsfertige Feuchttücher zur Desinfektion von Oberflächen empfindlicher, nicht invasiver Medizinprodukte. Das Produkt kombiniert eine sehr gute Wirksamkeit mit einer herausragenden Materialverträglichkeit. Vorgesehen für den Einsatz im medizinischen Bereich ((zahn)ärztliche Praxen, Kliniken, Altenheime, Pflege- und Rettungsdienste) sowie in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen.

Zusammensetzung:

In 100g Wirkstofflösung sind enthalten:

- 0,24g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchlorid
- 0,24g N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchlorid
- 0,24g C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammoniumchlorid

VO 648/2004/EG (Tränkflüssigkeit):

Enthält: Duftstoffe

Artikelnummer und Größe:

97-9090 | Rolle á 90 Blatt



Vorteile

- Hervorragende Materialverträglichkeit z.B. gegenüber Tablett, Acrylglas oder empfindlichem Kunstleder!
- Gebrauchsfertig
- breite Wirksamkeit innerhalb kürzester Zeit
- Aldehyd- und phenolfrei
- VAH-zertifiziert
- IHO gelistet

Anwendungshinweise

Desinfektion von nicht invasiven Medizinprodukten: Präparat zur prophylaktischen Wischdesinfektion von Medizinprodukten wie z.B. dentalen Behandlungseinheiten, Krankbetten, Blutdruckmessgeräten, etc. Zur Desinfektion die Oberfläche des Medizinproduktes mit dem getränkten Tuch abwischen.

Wirksamkeiten und Prüfmethode		Belastung	1 Min.	30 Min.
Bakterien und Candida albicans	EN 13727, EN 13624	hoch	☺	
„Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV)	RKI/DVV, EN 14476	hoch	☺	
Rota-Viren	EN 14476	niedrig	☺	
Noro-Viren	EN 14476	niedrig		☺
Polyoma-SV 40 Viren	RKI/DVV	Mit Belastung		☺
Getränkte Tücher (100%PET)				
Bakterien und Candida albicans	EN 16615, VAH	hoch	☺	


Sonstige Hinweise

- Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen.
- Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.
- Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender/ vom Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/ Patient niedergelassen ist, zu melden.
- Alle Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen rein zu Informationszwecken. Für die hier gemachten Angaben wird keine Gewähr und/oder Garantie übernommen. Angaben über Eignung und Anwendung der Produkte stellen keine verbindliche Vereinbarung bezüglich der vertraglichen Beschaffenheit oder einer spezifischen Verwendungseignung des Produkts dar. Vertragliche Regelungen, insbesondere vereinbarte Produktspezifikationen, haben stets Vorrang. Wir behalten uns das Recht vor, die Angaben zu diesem Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.

Anwendungshinweise

Zur Kennzeichnung das Stick- & Lifetikett vom Beutel abziehen und auf den Entnahmebehälter kleben. Den Beutel oben öffnen und in den Entnahmebehälter setzen. Das erste Tuch der Vliesrolle anziehen und durch den Stern im Deckelverschluss fädeln. Die folgenden Tücher entnehmen. Den Deckel nach der Tuchentnahme fest auf den Behälter drücken und dicht verschließen. Nach vollständigem Verbrauch der Tücher ist der Entnahmebehälter gemäß den Aufbereitungshinweisen zu reinigen und zu desinfizieren. Die Aufbereitung soll mit einem geeigneten, vorzugsweise alkoholischen Desinfektionstuch erfolgen. Alle zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig mit der Desinfektionslösung benetzt sein. Das Präparat gemäß angegebener Einwirkzeiten einwirken lassen. Vor großflächigen Anwendungen auf empfindlichen und/oder unbekannten Materialien wie Kunstleder erst an einer kleinen verdeckten Stelle auf Materialverträglichkeit testen. Um Schlierenbildung zu vermeiden, sollten die behandelten Flächen in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten (Wasser) Einmaltuch nachgewischt werden. Das Präparat gemäß angegebener Einwirkzeiten einwirken lassen. Die Tücher sind nach dem ersten Öffnen des Beutels maximal für 28 Tage verwendbar. Die Verwendung ist nur für professionelle Anwender vorgesehen.

pH-Wert: > 11

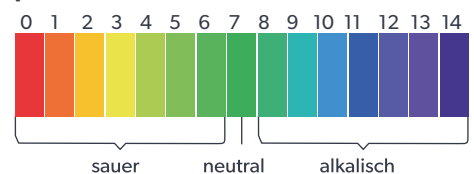

UNIGLOVES UK
 Registered in England No: 4010200
 VAT registration 791817787

3 Ambley Green,
 Gillingham Business Park,
 Gillingham, ME8 0NJ, UK
 +44 (0)800 049 6602
 enquiries@unigloves.co.uk
 uk.unigloves.com

UNIGLOVES GERMANY
 Arzt- & Klinikbedarf
 Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71
 D-53842 Troisdorf,
 Germany
 +49 (0) 2241-9323-0
 unigloves@unigloves.de
 de.unigloves.com

